

# Body Armor® Heel Reliever Dispositif de décharge du talon

Nouveau!

Décharge efficace dans la zone du talon pour les patients alités

One-Size-Fits-All



## INDICATIONS

- > Pour la prévention et la cicatrisation des escarres au niveau du talon et en cas de pied diabétique ou de décubitus, pour patient allongé
- > Score de 14 ou moins sur l'échelle de Braden
- > Diabète avec symptômes de déficience neurosensorielle
- > Pouls non perceptible au niveau du pied
- > Paraplégie
- > Immobilité prolongée ou coma

Code LPPR : 6285015

La face intérieure est disponible en deux types de mousse : alvéolée ou lisse



# DARCO

# Tous les avantages d'un seul coup d'œil

## Sangle et coussin pour le cou-de-pied

- > Maintient le pied en toute sécurité dans la position souhaitée
- > Pour la redistribution de la pression
- > Le rembourrage empêche le contact de la peau avec les sangles de l'avant-pied

## Bords et coins en mousse biseautée

- > Évite la pression sur les bords
- > Facilite la fermeture par chevauchement

## Soudures

- > Évite les irritations

## Rubans auto-agrippants

- > Pour une mise en place aisée
- > Pour stabiliser la position du pied
- > Avec bords cousus

## Orifices d'aération

- > Favorisent la circulation de l'air
- > Assurent le bien-être de la peau

## Étiquette apposée sur le produit

- > Possibilité de marquage
- > Mode d'emploi accessible par QR code

## Support de pied plus haut

- > Maintient également les grands pieds
- > Assure un maintien vertical
- > Empêche la chute du pied
- > Évite la rotation du pied

## Rembourrage pour le mollet long et fixé à l'intérieur (30 cm)

- > Enlève la pression du talon
- > Évite l'hyperextension du genou



## Dessous lisse

- > Pour permettre au pied de glisser sur les draps sans modifier son placement dans la botte

## Ouverture au niveau du talon

- > Pour s'assurer visuellement de la bonne décharge au niveau du talon



## Ajustement flexible de la taille (One-Size-Fits-All)



La longue ailette du tibia peut être attachée avec chevauchement pour permettre un ajustement individuel. Même les mollets les plus minces sont maintenus dans une position stable.

## Découpe facile



En plus du rembourrage pour le mollet long et fixé à l'intérieur, le rembourrage en mousse fourni en complément pour la région du mollet et la zone plantaire du pied permet de bien positionner le produit en fonction des besoins individuels et avec une répartition parfaite de la pression.

## Cale de positionnement



La cale de positionnement fournie permet d'éviter toute rotation de la hanche.

# S'ajuste individuellement selon le traitement

Le dispositif de décharge du talon Body Armor® Heel Reliever peut être adapté individuellement et facilement à chaque pied de patient en vue d'une décharge ciblée de la pression et d'un positionnement stable.



La botte à talon libre pour escarres Body Armor® Heel Reliever permet de décharger la pression du talon sur le tendon d'Achille et sur la jonction gastro soléaire du mollet.

La zone du talon est complètement libérée de toute pression de contact. Le talon « flotte » librement.

## Liste d'articles


### Body Armor® Heel Reliever

---

Couleur : Gris-Bleu

Utilisable de façon universelle (tour de mollet 25 – 54 cm, pointure jusqu'à 47)


Peut se porter à droite ou à gauche

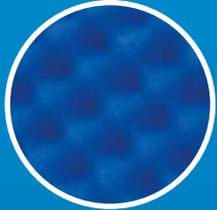

#### Mousse alvéolée

La structure en mousse alvéolée permet d'améliorer la circulation de l'air, assurant ainsi un effet refroidissant agréable.

RÉF : BAHR-N

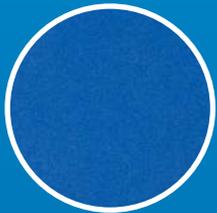

#### Mousse lisse

Le modèle en mousse lisse a été spécialement conçu pour les peaux sensibles. Il convient particulièrement aux patients diabétiques. Une formation d'oedèmes est ainsi évitée.

RÉF : BAHR-F

## Compris dans la livraison



**Rembourrage au niveau de l'avant-pied**



**Cale de positionnement**



**Rembourrage en mousse supplémentaire**



#### Sac à linge

Le dispositif de décharge du talon Body Armor® Heel Reliever peut être lavé à 60 °C dans le sac à linge fourni.



Vidéo produit