

# Relief Insert® Walker 2.0

## Orthèse de jambe-pied

Un dispositif - de nombreuses possibilités d'utilisation : attelle de positionnement, Walker et botte de marche pour lésions du tendon d'Achille dans un seul et même dispositif



Nouveau !



**DARCO**




# Avantages et caractéristiques

## Avantages

- > 3 en 1 : grâce à des éléments individuels amovibles, le dispositif peut être utilisé dans de nombreux domaines :
  1. Comme attelle de positionnement
  2. Avec la chaussure de décharge partielle du pied Relief Dual® Plus comme orthèse de jambe-pied.
  3. Avec les cales de talon DAW (kit en 3 parties) comme botte de marche pour lésions du tendon d'Achille pour la prévention individuelle du pied équin
- > Se met et se retire en toute simplicité pour un contrôle facile de la plaie
- > Maintien supplémentaire grâce à la sangle d'avant-pied en option (incluse)
- > Acceptation élevée des patients
  - Zone du talon souple grâce à la découpe de l'attelle
  - Design épuré
  - Poids plume
  - Hygiénique grâce au retrait de la chaussure et à la doublure remplaçable et lavable en machine à 60° C
  - Faible développement de chaleur

## Caractéristiques

- > Pour la mobilisation et le positionnement post-opératoires
- > Démarche physiologique sûre
- > Concept thérapeutique durable en association avec la chaussure de décharge partielle du pied Relief Dual® Plus
- > Peut se porter de façon universelle à droite et à gauche
- > Semelle intérieure amovible

 Droite = Gauche

 Poids plume

 Semelle intérieure amovible


## Stabilité maximale grâce à une adaptation individuelle

### Pompe intégrée

Pour une stabilisation au niveau de la cheville, le volume des chambres à air peut être augmenté et donc adapté individuellement. Une réduction de l'air est possible en actionnant la valve.

### Réglage automatique de la largeur

Grâce à la technique de coque innovante, l'orthèse se règle automatiquement sur le tour de mollet du patient. La compression des tissus mous qui en résulte génère une stabilité supplémentaire au niveau de la jambe inférieure et du pied. Lorsque les mollets sont particulièrement forts, le régulateur peut en outre être décroché.

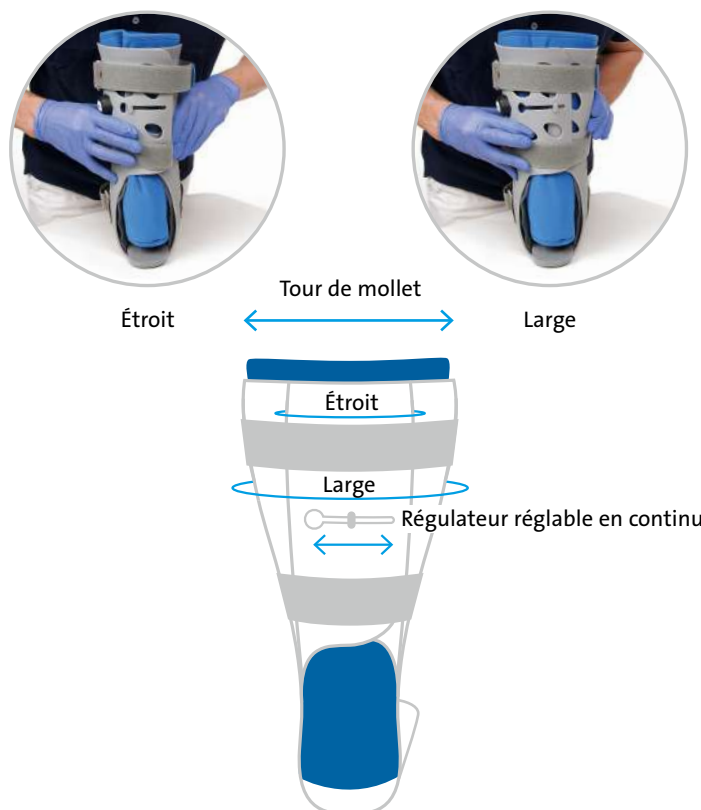

# Utilisation 1

## Attelle de positionnement | Relief Insert® 2.0

L'attelle de positionnement sert à maintenir le pied à un angle de 90° par rapport à la jambe inférieure. Pour une prévention individuelle du pied équin, les cales de talon DAW peuvent être utilisées pour maintenir un contact intégral avec le pied.

- > Prévention du pied d'équin
- > Protection conservatrice et postopératoire des structures lésées



Attelle de mollet avec doublure de mollet (lavable)



Reglage automatique de la largeur :  
Si nécessaire pour décrocher

Boucles de sangles

Pompe

Valve

Sangle d'avant-pied optionnelle (lavable)

Semelle intérieure amovible



# Utilisation 2

## Orthèse de jambe-pied | Relief Insert® Walker 2.0

En plaçant la chaussure de décharge partielle du pied Relief Dual® Plus, l'attelle de positionnement se transforme en orthèse de jambe-pied mobilisatrice. Le Relief Insert® Walker 2.0. peut être adapté avec différentes semelles voûte plantaire coussinée DARCO pour une décharge supplémentaire de la pression plantaire.

### Indications

- > Immobilisation préopératoire et postopératoire / post-traumatique de la région pied-jambe, fractures stables du pied et de la cheville, distorsions sévères de la cheville
- > En phase postopératoire après des fractures de Weber
- > En cas de ruptures des ligaments au niveau de la cheville
- > Arthrodèses de la cheville supérieure
- > En postopératoire, après ablation d'une exostose de Haglund (avec tendon d'Achille intact)
- > Arthrodèse de la 1ère articulation TMT (intervention de Lapidus)
- > Après des opérations de fracture métatarsienne
- > Après des opérations de l'hallux valgus
- > Après des opérations de l'hallux rigidus
- > Après des opérations d'orteils en marteau et en griffe
- > Fractures des phalanges
- > Après opérations de l'arrière-pied

### Compris dans la livraison

- > Relief Insert® 2.0 Attelle de positionnement
- > Relief Dual® Plus Chaussure de décharge partielle du pied
- > Sangle d'avant-pied optionnelle



**Relief Insert® 2.0**  
Attelle de positionnement

**Relief Dual® Plus**  
Chaussure de décharge partielle du pied

# Utilisation 3

## Achilles-Walker | Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Le Relief Insert® Walker 2.0 Achill est une orthèse de jambe-pied associée à un kit de cales en 3 parties pour la décharge du tendon d'Achille. L'élévation et l'angle du pied équin peuvent être adaptés au patient en variant les cales appliquées. 3 cales correspondent à 120°. Un retrait progressif des cales permet d'adapter l'angle du pied équin à l'évolution de la thérapie. La zone ouverte et souple du talon garantit une bonne circulation de l'air et a un effet positif sur la cicatrisation.

### Indications

- > Ruptures du tendon d'Achille
- > En postopératoire, après:
  - Suture du tendon d'Achille
  - Ablation d'une exostose (Haglund)

### Compris dans la livraison

- > Relief Insert® 2.0 Attelle de positionnement
- > Relief Dual® Plus Chaussure de décharge partielle du pied
- > Sangle d'avant-pied optionnelle
- > DAW (DARCO Achilles Wedges) Cales de talon



**Relief Insert® 2.0**  
Attelle de positionnement

**Relief Dual® Plus**  
Chaussure de décharge partielle du pied

**DAW (DARCO Achilles Wedges)**  
Cales de talon

## Liste d'articles



**Relief Insert® Walker 2.0**  
Orthèse de jambe-pied

TAILLE	RÉF.
--------	------

**Couleur : Gris-Bleu**

XS	37,0 – 38,5	RIW2-0
S	39,0 – 41,0	RIW2-1
M	41,5 – 43,0	RIW2-2
L	43,5 – 45,0	RIW2-3
XL	45,5 – 47,0	RIW2-4



**Relief Insert® Walker 2.0 Achill**  
Achilles-Walker (incl. DAW)

TAILLE	RÉF.
--------	------

**Couleur : Gris-Bleu**

XS	37,0 – 38,5	RIW2W-0
S	39,0 – 41,0	RIW2W-1
M	41,5 – 43,0	RIW2W-2
L	43,5 – 45,0	RIW2W-3
XL	45,5 – 47,0	RIW2W-4

## Compatible avec



**DAW (DARCO Achilles Wedges)**  
Cales de talon pour Walker

TAILLE	RÉF.
--------	------

**Couleur : Gris**

Universal	DAW
-----------	-----



**TwinShoe®**  
Chaussure de compensation de la hauteur

TAILLE	RÉF.
--------	------

**Couleur : Noir**

XS	33,5 – 37,0	TS0B
S	37,5 – 39,5	TS1B
M	40,0 – 41,5	TS2B
L	42,0 – 44,0	TS3B
XL	44,5 – 47,0	TS4B

## Systèmes de semelles



PegAssist® Insole



PegContour® Insole



Relief Contour Insole



Puzzle Insole®



PegContour® Insole Uni



Toe Cap Protège-orteils

## Tailles et dimensions



**XS 37–38,5**  
Semelle intérieure et  
protège-orteils = WM



**S 39–41**  
Semelle intérieure et  
protège-orteils = MS



**M 41,5–43**  
Semelle intérieure et  
protège-orteils = MM



**L 43,5–45**  
Semelle intérieure et  
protège-orteils = ML



**XL 45,5–47**  
Semelle intérieure et  
protège-orteils = MXL

Toutes les mesures sont définies en cm et correspondent à la semelle intérieure. Les tailles de chaussures DARCO ne représentent qu'une référence générale. Le choix de la pointure est fortement influencé par le volume des bandages et la taille du plâtre.



Vidéo