



La original Puzzle Insole® de DARCO – para la descarga selectiva de la presión

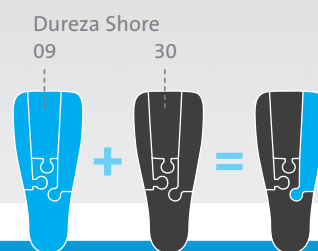

- > para la descarga de la presión según la indicación
- > efecto amortiguador
- > disponible para MedSurg y MedSurg Pro®
- > adecuada para el pie derecho e izquierdo

Dos se transforman en una:
¡para la adaptación individual!

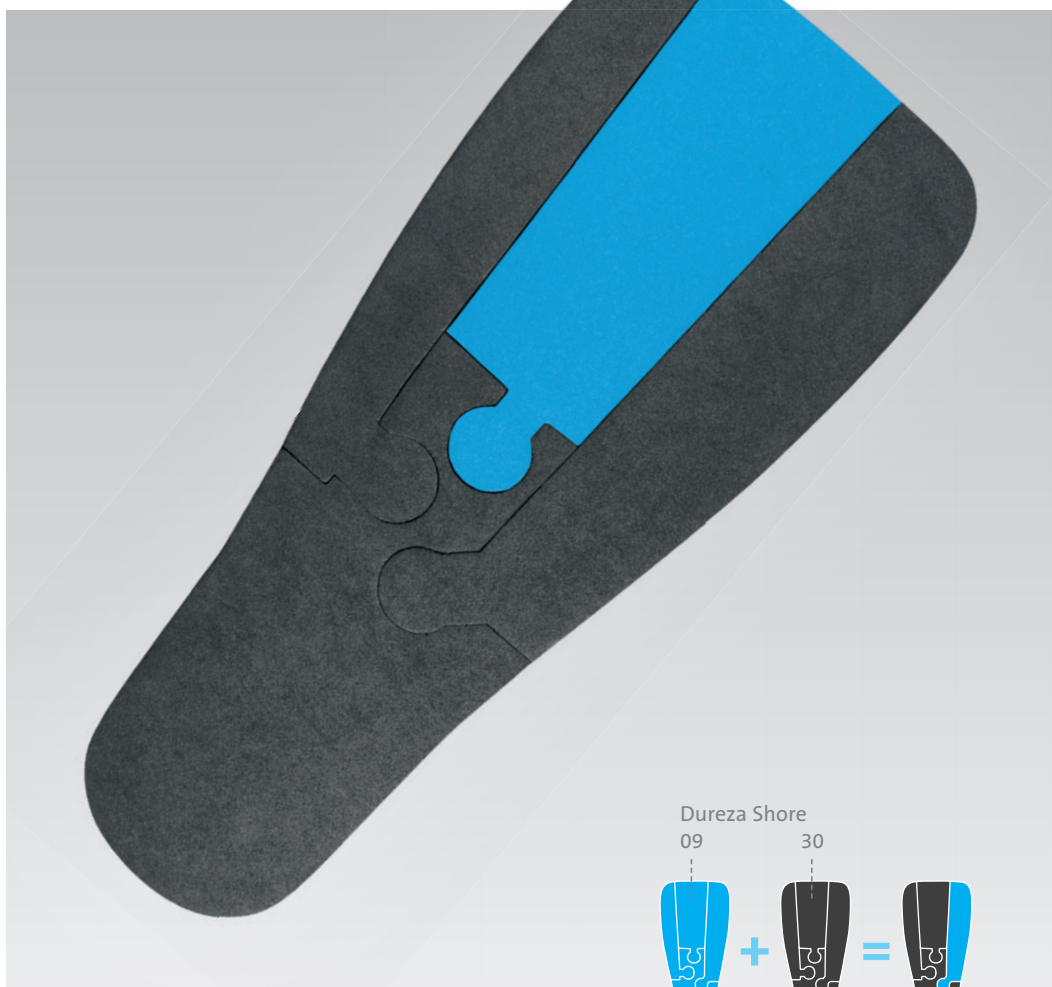

DARCO

La plantilla modular ha sido desarrollada para la distribución de la presión plantar y su uso está especialmente indicado después una intervención quirúrgica en el antepié y el mediopié.



Módulo del dedo pequeño (estrecho)

- > Dedo en varo (Digitus Superductus)
- > Fractura de Jones (el módulo Puzzle llega hasta la línea de Lisfranc)



Módulo del dedo gordo (ancho)

- > Artrodesis de la articulación MTF
- > Osteotomía de Austin, de Scarf y de Akin
- > Cuña de apertura y de cierre
- > Osteotomía en media luna
- > Artrodesis de Lapidus (artrodesis de la articulación TMT 1)
- > Osteotomía de Youngswick (el módulo Puzzle llega hasta el 1er cuneiforme)



Módulo central

- > Osteotomía de Weil y/o de Helal I – IV
- > Neuroma de Morton
- > Corrección del dedo en martillo
- > Artrodesis de la articulación interfalángica proximal (PIP)
- > Fracturas de los huesos metatarsianos II – IV
- > Osteotomía de acortamiento de los huesos metatarsianos II – IV (el módulo Puzzle llega hasta el extremo proximal de los metatarsianos II – IV)

La sencilla sustitución de los módulos permite ofrecer al paciente una distribución óptima de la presión según la indicación. La plantilla tiene forma de cuña en la parte anterior, lo que permite una descarga adicional de la presión del 22%, mientras que en la zona del talón es mucho más fina. Las plantillas de espuma de EVA de color negro y azul se diferencian únicamente por la dureza Shore.

La combinación de nuestro MedSurg de suela rígida con la plantilla modular permite conseguir una descarga plantar selectiva de hasta el 55%. La presión se midió en estado neutro con la plantilla convencional en el MedSurg primero y después con la plantilla modular.




MedSurg Pro® y Puzzle Insole® – Osteotomía de Scarf para hallux valgus

Colocación perfecta de la plantilla gracias al margen lateral elevado.


Plantilla MedSurg

Medición en estado neutro con la suela habitual del MedSurg.

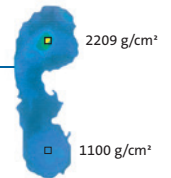



Puzzle Insole® sin el módulo azul

Más presión en la zona del talón gracias a la forma de cuña de Puzzle Insole®.

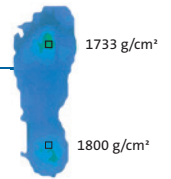

Puzzle Insole® con el módulo central azul

La descarga selectiva de la presión del 45% en la zona de los metatarsos II y III se consigue sustituyendo el módulo central (dureza Shore 30/negro) por el módulo con una menor dureza Shore (09/azul).

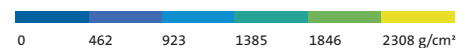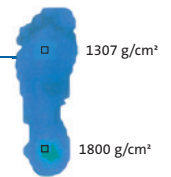

Para MedSurg /-Pro®

TALLA (D/EU)

Nº ART.

Señoras:

WS	34,0 – 36,5	PI-WS
WM	37,0 – 38,5	PI-WM
WL	39,0 – 41,0	PI-WL

Caballeros:

MS	39,0 – 41,0	PI-MS
MM	41,5 – 43,0	PI-MM
ML	43,5 – 45,0	PI-ML
MXL	45,5 – 47,0	PI-MXL