



Tailles et mesures

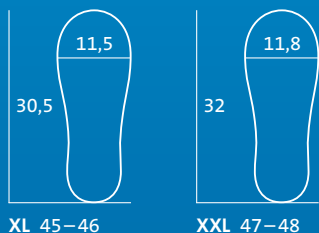

Toutes les mesures sont indiquées en cm et correspondent à la taille de la semelle intérieure.

La détermination correcte de la taille est essentielle pour la fonctionnalité de la chaussure. Pour choisir la taille correcte on utilise la classification indiquée ci-joint. Sur la face intérieure de la semelle est imprimé un « D ». La première tête du tercer métatarsien se place directement avant ce (distale) « D » dans la chaussure. De cette façon on assure que le point de pression de la Rocker-semelle déroulante se trouve derrière la tête du tercer métatarsien et derrière l'avant-pied.

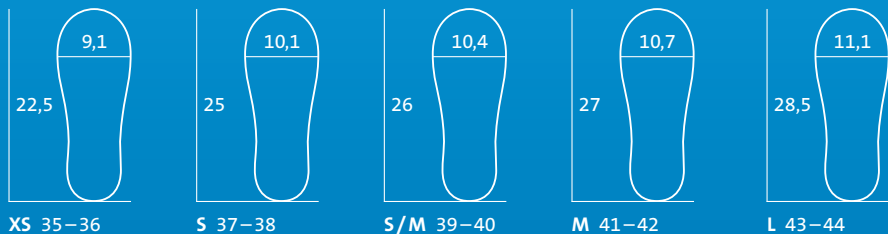

Code LPPR
2183855

Temps pour la répartition correcte de la pression :
Avec notre WCS® chaussure pour le soin
des plaies diabétiques

Avec un tutoriel vidéo détaillé pour une adaptation individuelle



Éditeur et responsable pour le contenu

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting, Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco-europe.com | www.darco-europe.com



171129



DARCO

Décharge de la pression : Objectif principal pour le traitement des plaies ouvertes au pied.

Adaptation individuelle

La WCS® peut être ajustée individuellement pour réaliser une décharge ciblée. La construction et le post-traitement artisanale du système à quatre semelles offre une répartition complémentaire de la pression plantaire.

Décharge individuelle

En cas d'une décharge dans la zone dorso-médiale ou latérale du pied (malum perforans) on peut enlever, indépendamment du degré d'ulcération, seulement la couche de cuir extérieure de la partie supérieure de la chaussure qui se trouve aux abords de la plaie. Le matériel de mousse Plastazote permet que la chaussure intérieure reste intacte pour éviter que se forment les œdèmes du talon au bord de la plaie.

Stabilité et décharge de la pression

La construction, la possibilité de bien ouvrir la chaussure et régler les fermetures velcros assurent un accueil des bandages volumineux. La semelle de marche est conçue de sorte à vous offrir une marche parfaite. Il est possible de porter la chaussure aussi à l'extérieur.

x

Avantages de la WCS® chaussure pour le soin des plaies diabétiques :



Option d'une ouverture ample

- > Entrée simple
- > Beaucoup d'espace pour les bandages



Semelle de marche spéciale

- > Sécurité élevée
- > Comportement de marche optimale



Réduction de forces de cisaillement par la partie lisse de la semelle




Stabilité élevée à l'aide de la zone rugueuse de la semelle



Système à quatre semelles

- > Duretés Shore différentes
- > Découpe facile

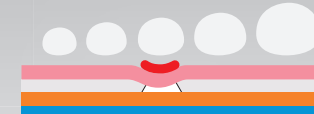

Couper les semelles – exemple

Section transversale de la décharge d'un ulcère de pression sous la tête du 3^e métatarsien



compatible avec

- 1 **TwinShoe®** en tant que chaussure de compensation de hauteur
- 2 **Toe Cap** Protège-orteils, protège du froid et de la saleté