

Le système original PegAssist™ de DARCO pour une décharge de pression ciblée.



Nouveau: forme spéciale
pour OrthoWedge Light

- > pour une décharge de pression ciblée grâce à des alvéoles amovibles
- > absorbe les chocs
- > disponible pour les modèles de chaussures présentés au verso
- > peut être portée à gauche et à droite
- > forme spéciale pour OrthoWedge Light



DARCO


Les alvéoles sont retirées aux emplacements spécifiques pour maintenir une décharge de pression ciblée. La protection en carton sert ensuite à stabiliser la zone de décharge.



Le système de semelle PegAssist™ est disponible pour tous les modèles représentés.

La semelle d'une épaisseur de 18 mm est composée d'une combinaison de Plastazote®, Poron® et EVA. La combinaison parfaite pour réduire les chocs et pour l'aptitude au moulage.

Après avoir retiré les alvéoles aux emplacements spécifiques, la protection en carton est collée sur toute la surface de la semelle. Elle est recouverte d'un film adhésif et fixe ainsi les alvéoles autour de la zone de décharge, assurant ainsi que cette dernière reste stable. La protection en carton est comprise dans la livraison.

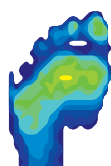

Chaussure de pansement standard



OrthoWedge



+ PegAssist™

MedSurg™ / -Pro

N° d'article	Pointure	
Femmes:		
PASW1	Small	34,0 – 36,5
PASW2	Medium	37,0 – 38,5
PASW3	Large	39,0 – 41,0
Hommes:		
PASM1	Small	39,0 – 41,0
PASM2	Medium	41,5 – 43,0
PASM3	Large	43,5 – 45,0
PASM4	X-Large	45,5 – 47,0

OrthoWedge Light (forme spéciale)

N° d'article	Pointure	
PASSTL0	X-Small	33,5 – 37,0
PASSTL1	Small	37,5 – 39,5
PASSTL2	Medium	40,0 – 41,5
PASSTL3	Large	42,0 – 44,0
PASSTL4	X-Large	45,5 – 47,0

Tous les autres modèles

PAS0	X-Small	33,5 – 37,0
PAS1	Small	37,5 – 39,5
PAS2	Medium	40,0 – 41,5
PAS3	Large	42,0 – 44,0
PAS4	X-Large	45,5 – 47,0

